



## Étape 1 pour votre dépistage: Vous avez reçu une fiche de suivi que vous devez joindre à votre test

**Veillez vérifier les informations ci-dessous, les compléter et les corriger si nécessaire**

Nom :	« Nom »	« IdDossierBarcode »
Prénom :	« Prénom »	#« IdDossier »#
Nom de naissance :	« Nom de naissance »	
Adresse :	« Adresse1 »	
	« Adresse2 »	
	« Adresse3 »	
	« NPA » « Localite »	
Date de naissance :	« Date de naissance »	Téléphone : « Prive » « Mobile »
Assurance	« AssuranceNom »	N° Assuré-e : « AssuranceNr »
Médecin traitant :	« Medecin1Prenom »	« MedecinNom »
	« Medecin1Adr1 »	
	« Medecin1Adr2 »	
	« Medecin1Adr3 »	
	« Medecin1NPA » « Medecin1Localite »	
Date de remise OU d'envoi du test : #Date#		
« PharmacieBarcode »		
Date de prélèvement des selles : --/--/----		
<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;">                 COLLEZ ICI l'étiquette code-barres qui se trouve sur le test #             </div>		
<b>Il est indispensable d'inscrire au stylo vos nom, prénom et date de naissance sur le tube du test</b>		
En signant : - je déclare avoir été informé-e de la manière dont fonctionne le dépistage, de ses avantages et de ses limites ; - j'autorise la transmission et l'échange de mes données médicales entre les professionnels impliqués dans le dépistage, tant par voie postale qu'électronique, de même que l'enregistrement et l'archivage de mes données par le centre de dépistage. Ces données resteront confidentielles ; je dispose en tout temps d'un droit d'accès et de rectification de mes informations personnelles ; - j'autorise l'échange d'informations entre le médecin dont j'ai indiqué le nom et les professionnels actifs dans le centre du programme de dépistage ; - j'autorise la transmission de résultats d'examen complémentaires au programme de dépistage si le résultat de mon examen de dépistage le nécessite ; - j'autorise qu'en cas de déménagement, mon dossier soit transmis au programme de dépistage de mon nouveau canton de domicile ; - je déclare avoir été informé-e que mes données, rendues anonymes, peuvent être utilisées à des fins statistiques et d'amélioration de la qualité du programme ; - je comprends que cet examen fait l'objet d'une facture hors franchise, d'un montant forfaitaire de CHF 46, qui sera adressée uniquement à l'assurance, sans copie à l'assuré-e, et que, si je le souhaite, je peux en demander une copie à la FGDC. - je comprends qu'en cas de cancer, mes données nominatives de santé seront transmises au Registre genevois des tumeurs selon la loi fédérale sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO).		
Date : : --/--/----	Signature : _____	

### Le kit «test de dépistage»

- Ce mode d'emploi
- Un tube plat de prélèvement
- Une feuille de recueil de selles
- Un sachet plastique
- L'enveloppe d'expédition du test

### Important :


Il est essentiel d'indiquer la date à laquelle vous avez réalisé votre test faute de quoi il ne pourra pas être interprété. Il est également important de l'envoyer sous 24 heures et d'éviter de le poster les veilles de jours fériés.

À l'attention des femmes non ménopausées: le test doit être réalisé en dehors de la période des règles, idéalement 2-3 jours après la période des règles.

Vérifiez l'exactitude de ces informations

Notez la date de réalisation du test

Décollez cette étiquette du tube plat et collez-la sur la fiche de suivi

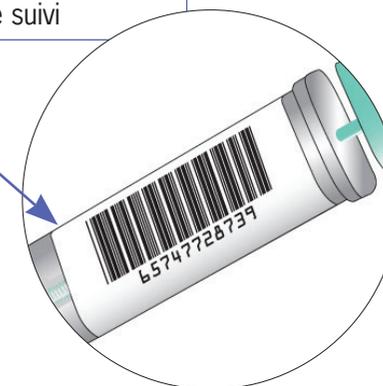

Datez et signez la mention d'information et d'autorisation de traitement des données

## Étape 2 pour votre dépistage:

1 Notez sur l'étiquette du tube plat votre nom, prénom, date de naissance.




2 Urinez si besoin puis collez la feuille de recueil des selles sur la lunette des WC comme sur le dessin.



3 Allez à la selle (les selles ne doivent pas entrer en contact avec l'urine ou l'eau des toilettes).




4 Ouvrez le tube plat en dévissant délicatement le bouchon turquoise: la tige de prélèvement apparaît.

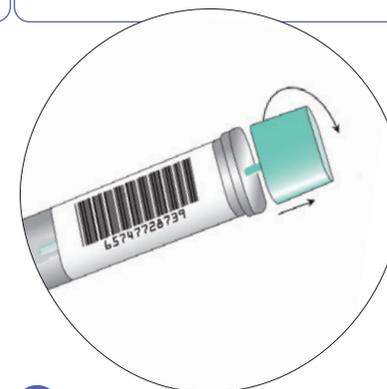

5 «Râclez» les selles en 5 à 6 endroits différents avec la tige turquoise. Tous les sillons doivent être remplis de selles.


Attention: l'excès de selles rend le test ininterprétable

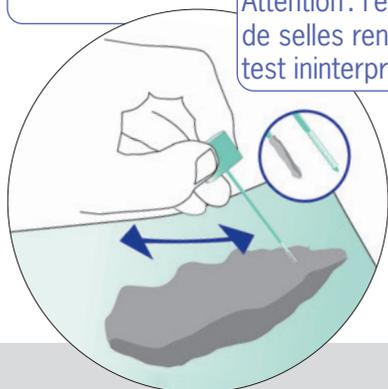

6 Remettez la tige dans le tube et refermez-le. Un clic sonore confirme que le tube est bien fermé.



7 Secouez énergiquement le tube de prélèvement fermé. Glissez-le dans le sachet plastique, puis dans l'enveloppe d'expédition.

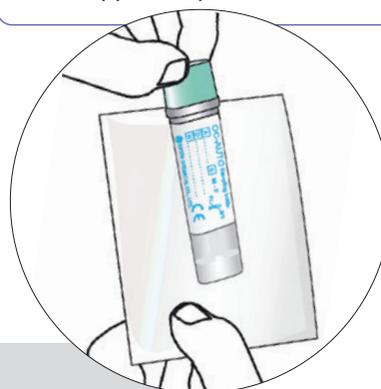

8 Expédiez dans les 24 heures le tube de prélèvement **ainsi que la fiche de suivi** au laboratoire d'analyse. Un envoi rapide garantit une meilleure fiabilité du test.

