

U ovom uputstvu je objašnjeno kako se koristi test.
Pažljivo pročitajte!

Korak 1 za vaš skrining: Dobili ste list za praćenje koji morate priložiti uz test.

Proverite informacije u nastavku, dopunite ih i ispravite ako je potrebno

Prezime:
Ime:
Rođeno prezime:
Adresa:

Datum rođenja:
Telefon:

Osiguranje:
Br. osiguranika:

Izabrani lekar:

Datum uručivanja ILI slanja testa:

Datum uzimanja uzorka stolice: --/--/----

ZAPEJTE OVDE
etiketu sa bar kodom
koja se nalazi na testu

Neophodno je da olovkom napišete svoje prezime, ime i datum rođenja na posudi za uzorkovanje

Al firmar:

- Izjavljujem da sam obavešten(a) o tome kako skrining funkcioniše, njegovim prednostima i granicama;
- Dozvoljavam prenos i razmenu mojih medicinskih podataka između profesionalaca uključenih u postupak skrininga, poštom i elektronskim putem, kao i snimanje i arhiviranje mojih podataka od strane centra za skrining. Ovi podaci će ostati poverljivi; imam pravo da pristupam svojim ličnim podacima u bilo kom trenutku i da ih ispravljam;
- Dozvoljavam razmenu informacija između lekara čije sam ime naveo i profesionalaca koji rade u centru skrining programa;
- Dozvoljavam prenos rezultata dodatnih pregleda u program skrininga ako to zahteva rezultat mog skrining pregleda;
- Dozvoljavam da u slučaju preseljenja moj dosije bude poslat u program skrininga mog novog kantona prebivališta;
- Izjavljujem da sam obavešten(a) da se moji podaci, kao anonimni, mogu koristiti u statističke svrhe i za poboljšanje kvaliteta programa.
- Razumem da se za ovaj pregled izdaje račun bez franšize, na paušalni iznos od 46 CHF, koji će biti poslat samo osiguravajućem društvu, bez kopije osiguraniku, i da, ako želim, mogu da zatražim kopiju od FGDC-a.

☐ Označavanjem ovog polja odbijam da se moji lični zdravstveni podaci prenesu Ženevskom registru za tumore.

Datum: --/--/---- Potpis: _____

Komplet za « skrining test »

- Ovo uputstvo za upotrebu
- Posuda sa ravnim dnom za prikupljanje uzorka
- List za prikupljanje stolice
- Plastična kesa
- Koverta za slanje testa

Važno:

Neophodno je navesti datum kada ste obavili test, inače se rezultat ne može protumačiti. Važno je i da se uzorak pošalje u roku od 24 sata kao i da se izbegne slanje dan pre državnih praznika. Za žene koje nisu u menopauzi: test treba uraditi van menstrualnog perioda, idealno 2-3 dana po završetku menstruacije.

Proverite tačnost ovih informacija.

Zabeležite datum obavljanja testa.

Odlepите ovu etiketu sa posude za uzorkovanje i zalepите je na list za praćenje

Datirajte i potpišite obaveštenje o informacijama i ovlašćenju za obradu podataka.



Za više informacija ili detaljnija uputstva, obratite se svom farmaceutu, lekaru ili Ženevskoj fondaciji za skrining raka - 022 708 10 90

Korak 2 Okrenite stranu

U ovom uputstvu je objašnjeno kako se koristi test.
Pažljivo pročitajte!

Korak 1 za vaš skrining:

1

Na etiketi posude za uzorkovanje zabeležite svoje prezime, ime, datum rođenja.



2

Urinirajte ako je potrebno, a zatim zalepite list za prikupljanje uzorka stolice na dasku toaleta kao što je prikazano na crtežu.




3

Obavite defekaciju (stolica ne bi trebalo da dođe u kontakt sa urinom ili vodom iz wc šolje).



4

Otvorite posudu za uzorkovanje pažljivim odvrtnjem tirkiznog poklopca: pojavljuje se štapić za uzorkovanje.

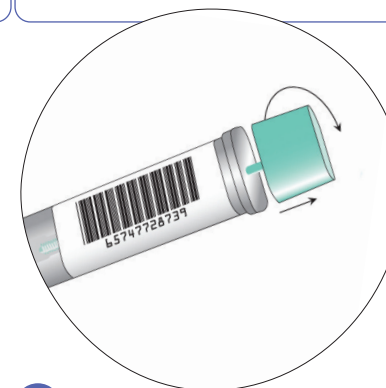

5


„Ostružite“ stolicu na 5 do 6 različitih mesta pomoću tirkiznog štapića. Sve brazde treba popuniti stolicom.



Upozorenje: višak stolice čini test nerazumljivim.

6

Vratite štapić u posudu za uzorkovanje i zatvorite je. Zvučni klik potvrđuje da je posuda pravilno zatvorena.

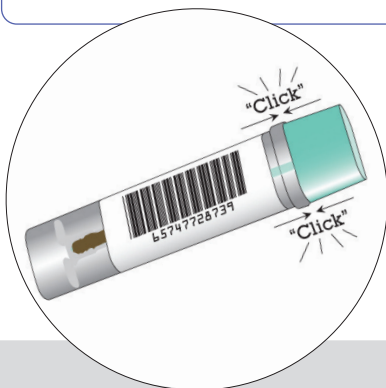

7

Snažno protresite zatvorenu posudu za uzorkovanje. Stavite je u plastičnu kesu, a zatim u kovertu za slanje.



8

Pošaljite posudu za uzorkovanje **kao i** list za praćenje u laboratoriju za analizu u roku od 24 sata. Brza isporuka garantuje bolju pouzdanost testa.



Za više informacija ili detaljnija uputstva, obratite se svom farmaceutu, lekaru ili Ženevskoj fondaciji za skrining raka - 022 708 10 90

Rezultat će vam biti poslat u roku od osam radnih dana.